

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para configurar o ECGPC na Telemedicina em conjunto com o Dropbox, quando houver vários Postos de Exames e vários laudadores.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:

- ECGPC de gabinete cinza / azul com a versão 6.5 rev9 em diante.


3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que os ECGPCs estão funcionando corretamente
- A versão do programa do ECGCP deve ser a mesma nos Postos, Central de distribuição e Laudos.


4. PROCEDIMENTO

- Definir um computador para a Central de Distribuição. Este computador deve ter as características de um Servidor, ou seja, ficará sempre ligado.
Instalar o programa DROPBOX em todos os computadores. Todos devem ter acesso à mesma conta do Dropbox.
- Criar na pasta Dropbox:
 - uma pasta **Central**;
 - uma pasta **Distrib**;
 - uma pasta para cada **Posto**, com o mesmo nome usado na Sigla do Local de Instalação definida para o posto na Configuração do Sistema dele.
 - uma pasta para cada **Laudos**, com o mesmo nome usado na Sigla do Local de Instalação definida para o laudo na Configuração do Sistema dele.
 - **ATENÇÃO: Todas as pastas devem estar no raiz do Dropbox. Não crie subpastas.**

Pastas do Dropbox:

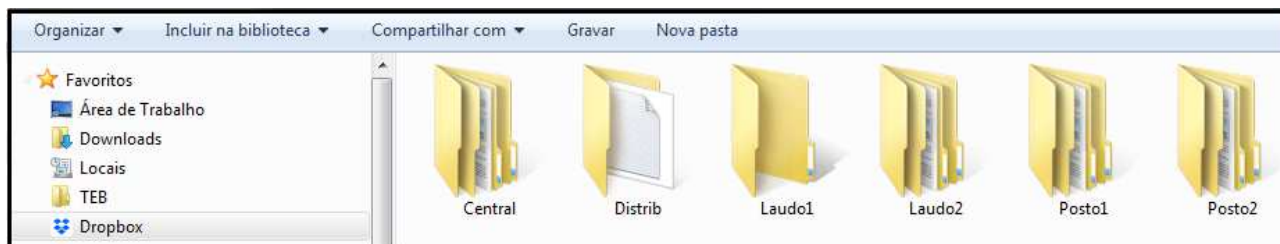

Sigla do Posto:

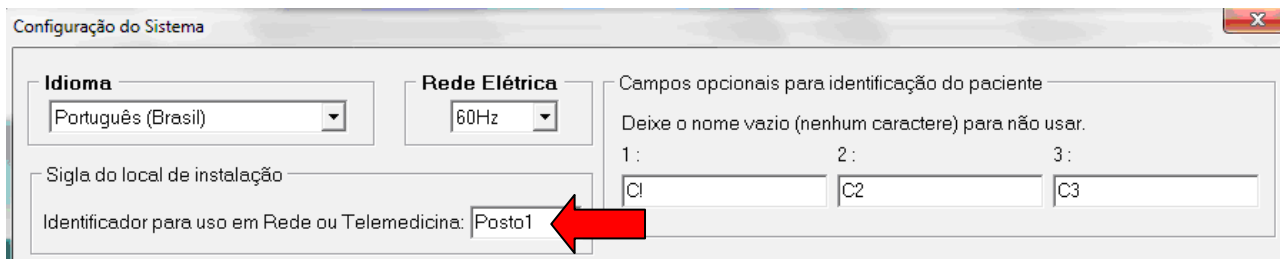


O Dropbox permite que somente as pastas utilizadas pelos Postos e Laudos sejam sincronizadas. Esta configuração evita que mensagens desnecessárias do Dropbox sejam visualizadas em todos os usuários.

Exemplos:


- Posto1:
Sincronizar somente as pastas Posto1 e Central

- Laudo1:
Sincronizar somente as pastas Laudo1 e Distrib

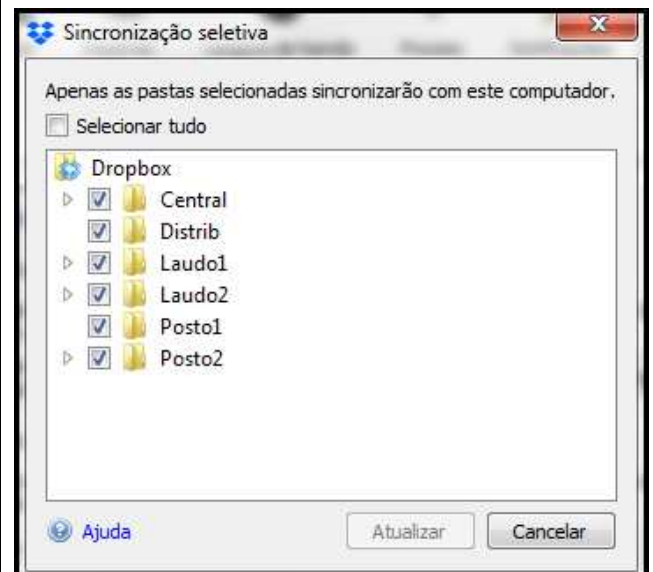

Na configuração dos **POSTOS de EXAMES**:

- selecionar a opção “Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é a sigla do posto;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da Central na área compartilhada;
- não marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na internet”.

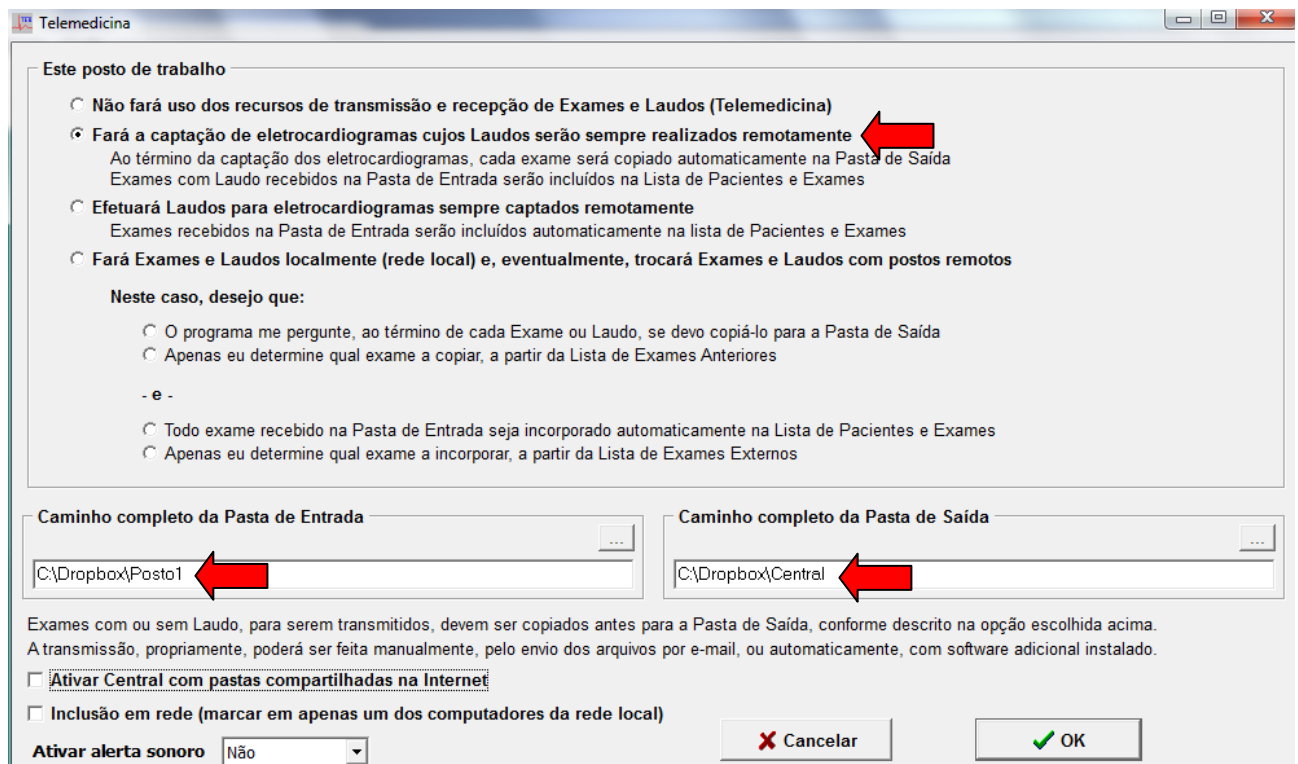

	Telemedicina via Dropbox com vários laudadores	Número ITM-102	Data 28/10/14 Rev. 00	Página 3 / 5
---	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

Na tela de **Configuração de Telemedicina** na **CENTRAL de DISTRIBUIÇÃO**:

- selecionar a opção “Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta criada para a Central na área compartilhada;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da área compartilhada onde estão as pastas dos postos;
- marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet”;
- marcar a opção “Ativar Central de Distribuição para laudadores remotos”;
- configurar como Pasta de Entrada de Solicitações e Laudos a pasta criada para a Distrib na área compartilhada.

Este posto de trabalho

☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)

☐ Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente
Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída
Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames

☒ **Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente (Central)**
Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames

☐ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas recebidos de Central de Distribuição mediante solicitação

☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos

Neste caso, desejo que:

☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída

☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores

- e -

☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames

☐ Apenas eu determine qual exame a incorporar, a partir da Lista de Exames Externos

Caminho completo da Pasta de Entrada: C:\Dropbox\Central

Caminho completo da Pasta de Saída: C:\Dropbox

Exames com ou sem Laudo, para serem transmitidos, devem ser copiados antes para a Pasta de Saída, conforme descrito na opção escolhida acima.
A transmissão, propriamente, poderá ser feita manualmente, pelo envio dos arquivos por e-mail, ou automaticamente, com software adicional instalado.

☒ Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet

☒ Ativar Central de Distribuição para laudadores remotos ==>

Pasta de Entrada de Solicitações e Laudos (Central de Distribuição): C:\Dropbox\Distrib


☐ Inclusão em rede (marcar em apenas um dos computadores da rede local)

Ativar alerta sonoro: Não

Cancelar OK

Na configuração dos **POSTOS de LAUDOS**:

- selecionar a opção “Efetuará laudos para ECG recebidos da Central de Distribuição mediante solicitação”.
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é a sigla do posto;
- configurar como Pasta de Saída a pasta Distrib na área compartilhada;
- não marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na internet”.

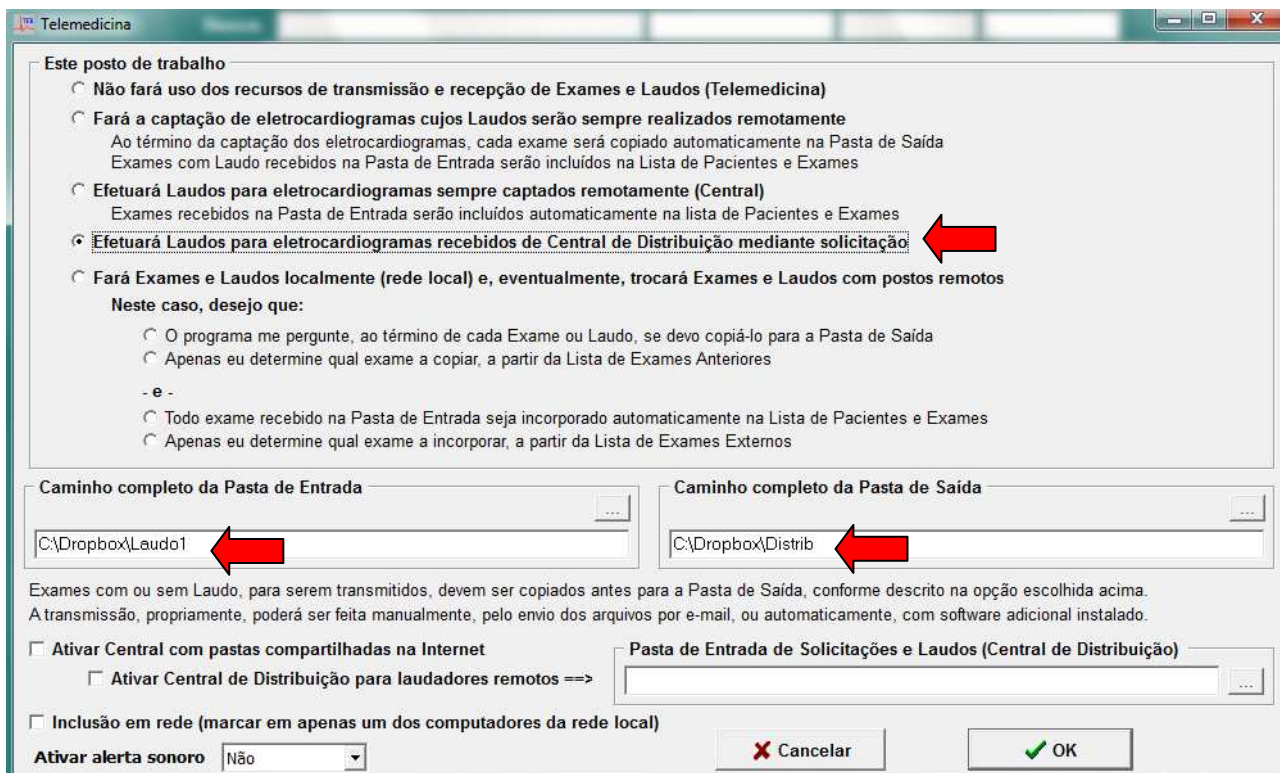

O programa do ECGPC instalado nos computadores de Laudos, apresentará a seguinte tela, onde será informado a quantidade de exames disponíveis para laudar:

