

<b>TEB</b> <sup>®</sup>	<b>Repetidor de vídeo do Polígrafo</b>	Número ITM-113	Data 29/10/18 Rev. 00	Página 1 / 2
-------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

## 1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para instalar um repetidor de vídeo no polígrafo SP12.

## 2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:

- SP12 fornecidos com computador Lenovo S520 a partir do n/s: 171700107
- Salas de Hemodinâmica com monitor de vídeo da estativa com entrada digital DVI

## 3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que o polígrafo está funcionando corretamente.
- O cabo de ligação entre o monitor da estativa e o polígrafo devem estar instalado e os conectores DVI disponíveis.
- A TEB não fornece o cabo e os conectores DVI: são de responsabilidade do cliente disponibilizá-los.

## 4. MATERIAL NECESSÁRIO

- Adaptador Display Port para DVI

## 5. PROCEDIMENTO

### 5.1. SAÍDAS DE VIDEO DO LENOVO S520:

O computador Lenovo S520 possui 3 saídas de vídeo:

VGA: monitor de controle

HDMI: monitor de sinais – local

Display Port com adaptador para DVI: monitor de sinais – estativa




TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA.

Av. Diederichsen 1057 - São Paulo – Fone/Fax: (11) 5017-8555 – e-mail: tebserv@teb.com.br

### 5.2. CONEXÕES DOS MONITORES DE VIDEO

- Monitor de controle (direita): cabo VGA
- Monitor de sinais (esquerda): cabo HDMI
- Monitor de sinais (estativa): cabo DVI

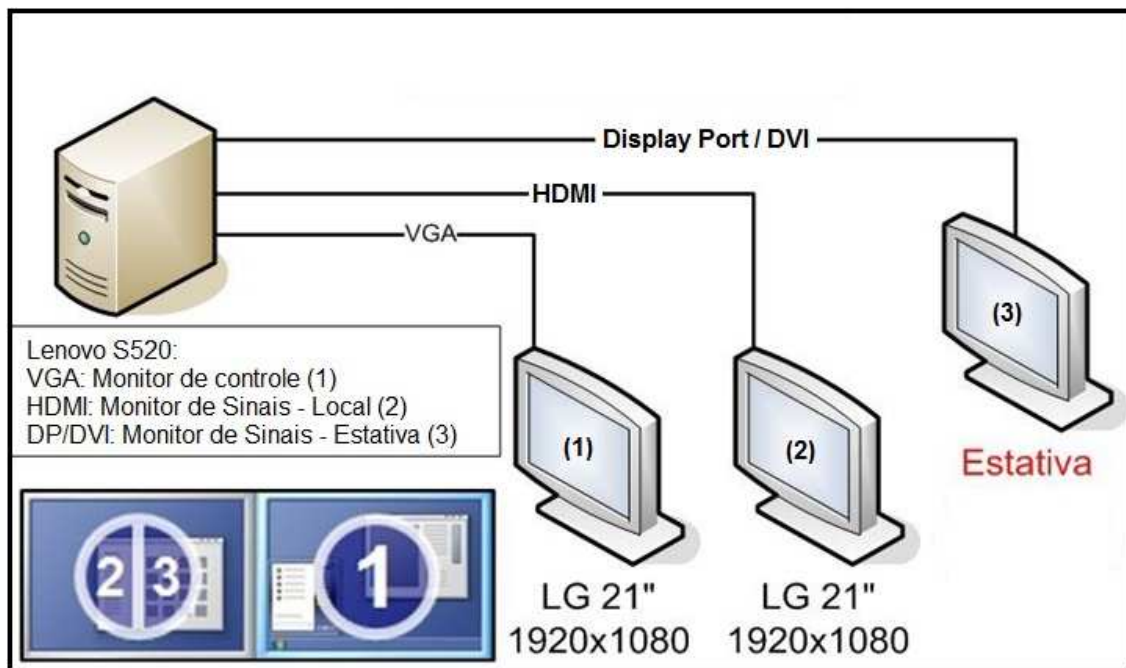

### 5.3. CONFIGURAÇÃO DO VIDEO NO WINDOWS

- Clique com botão direito do mouse na área de trabalho e selecione a opção Configurações de exibição
- Configure os vídeos conforme a figura:



Monitor 1 à direita (Tornar este meu vídeo principal)  
Monitor 2 e 3 duplicados à esquerda

