

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para configurar o ECGPC na Telemedicina em conjunto com o Dropbox, quando houver vários Postos de Exames e uma Central da Laudos.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:


- ECGPC de gabinete cinza / azul com a versão 6.5 rev5 em diante.

3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que os ECGPCs estão funcionando corretamente
- A versão do programa do ECGPC deve ser a mesma nos Postos e na Central


4. PROCEDIMENTO

- Instalar o programa DROPBOX no computador da central e nos computadores dos postos remotos.
- Criar na pasta Dropbox:
 - uma pasta para a **Central**;
 - uma pasta para cada **Posto**, com o mesmo nome usado na Sigla do Local de Instalação definida para o posto na Configuração do Sistema dele.

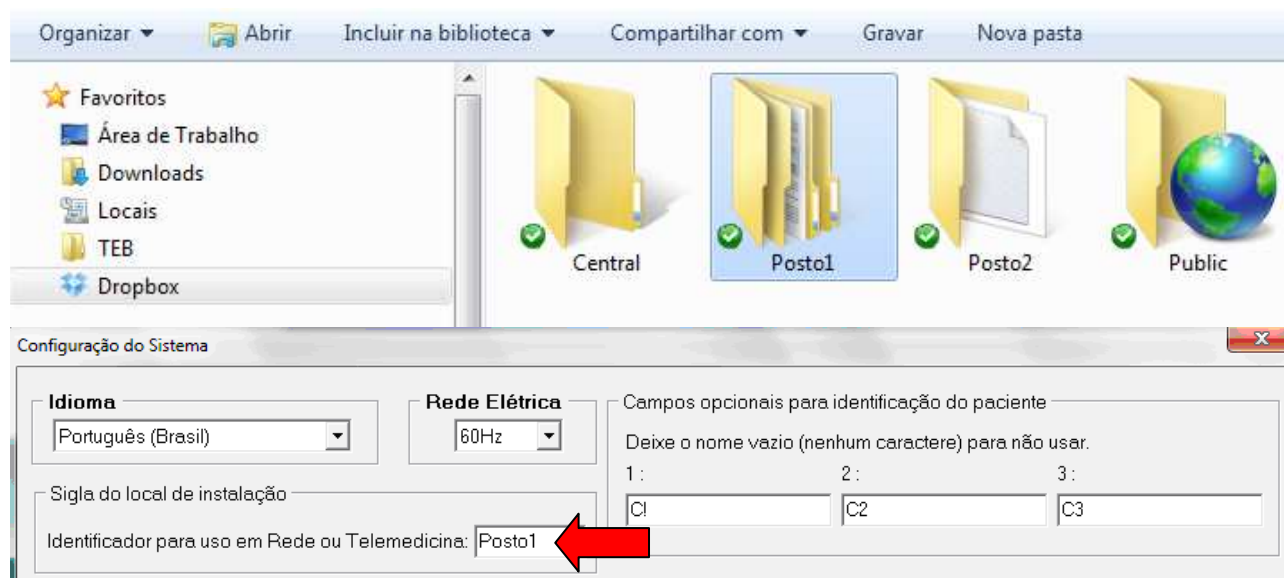

Na tela de **Configuração de Telemedicina** na **CENTRAL**:

- selecionar a opção “Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta criada para a Central na área compartilhada;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da área compartilhada onde estão as pastas dos postos;
- marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na WEB”.

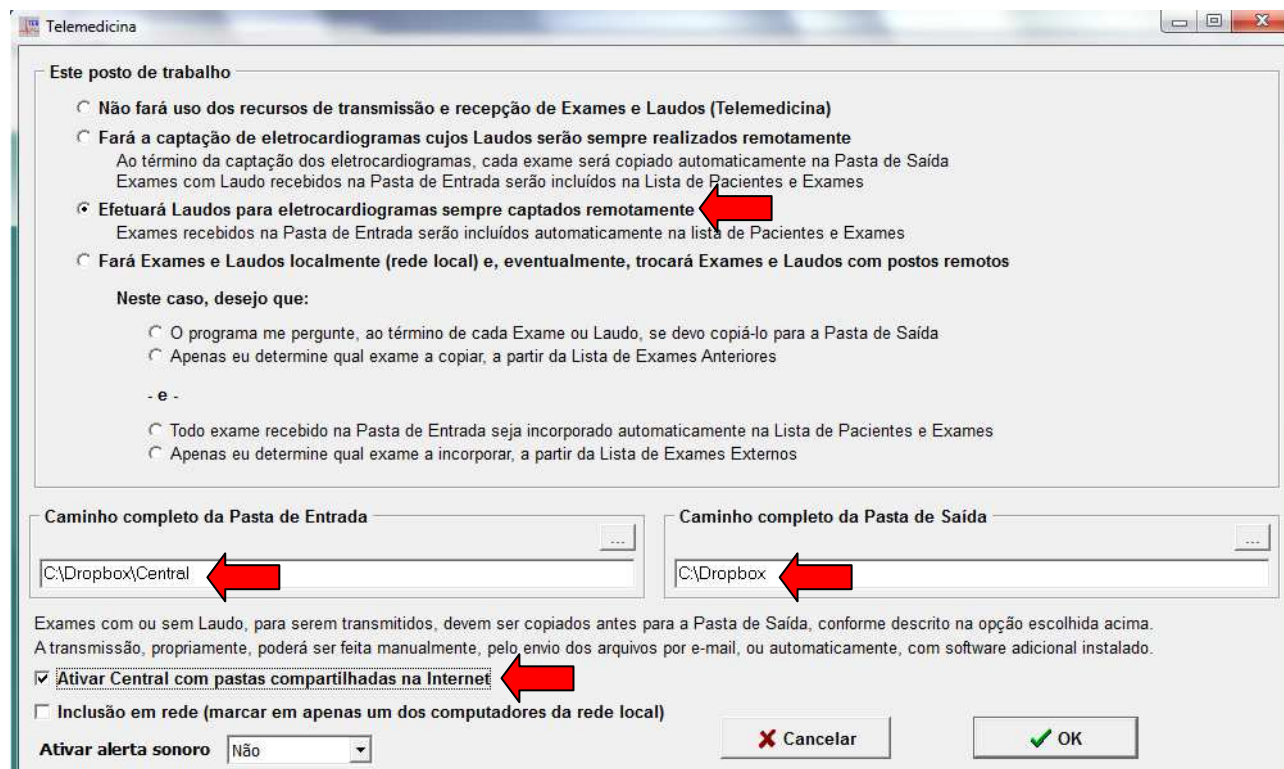

Este posto de trabalho

☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
☐ Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente
Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída. Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames
☒ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente
Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames
☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos

Neste caso, desejo que:

☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
☐ Apenas eu determine qual exame a incorporar, a partir da Lista de Exames Externos

Caminho completo da Pasta de Entrada

C:\Dropbox\Central

Caminho completo da Pasta de Saída

C:\Dropbox


Exames com ou sem Laudo, para serem transmitidos, devem ser copiados antes para a Pasta de Saída, conforme descrito na opção escolhida acima. A transmissão, propriamente, poderá ser feita manualmente, pelo envio dos arquivos por e-mail, ou automaticamente, com software adicional instalado.

☒ Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet
☐ Inclusão em rede (marcar em apenas um dos computadores da rede local)

Ativar alerta sonoro: Não

Na configuração dos **POSTOS**:

- selecionar a opção “Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é a sigla do posto;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da Central na área compartilhada;
- não marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na WEB”.

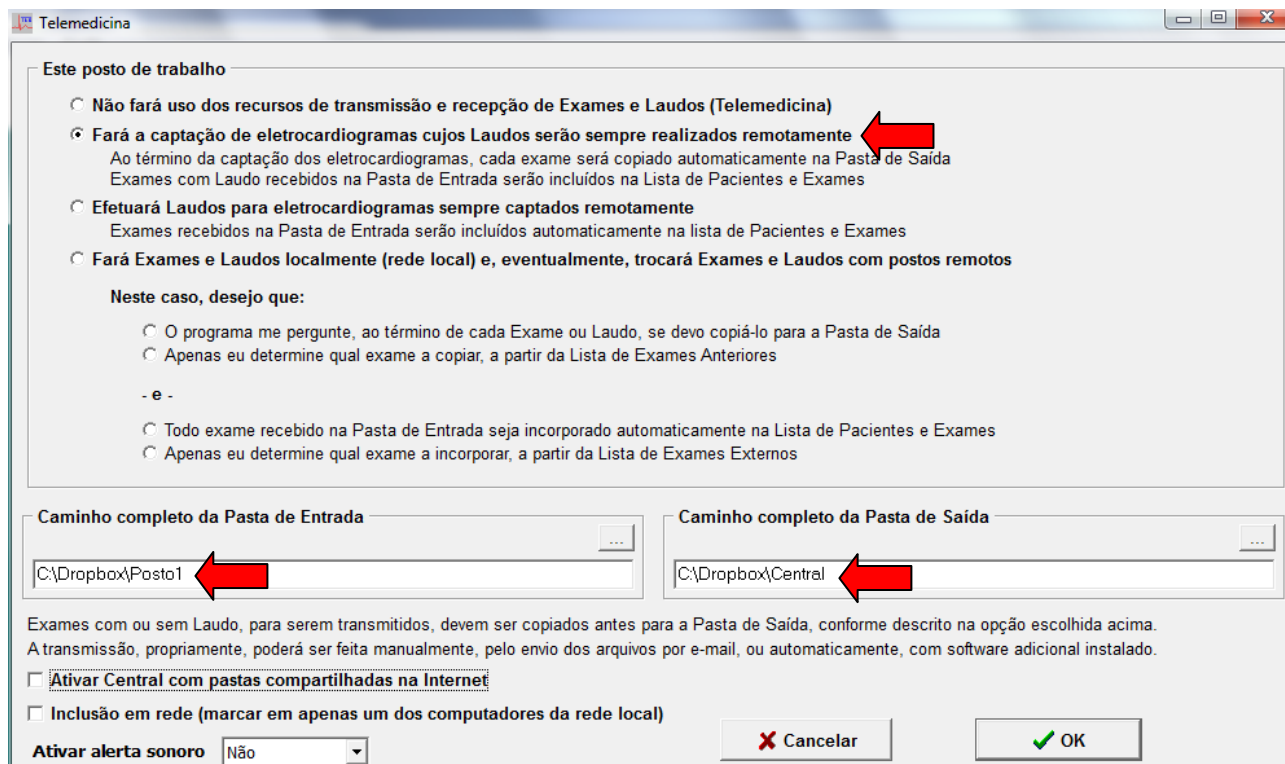

Este posto de trabalho

☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
☒ **Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente**
Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída. Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames.
☐ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente
Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames.
☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos

Neste caso, desejo que:

☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
☐ Apenas eu determine qual exame a incorporar, a partir da Lista de Exames Externos

Caminho completo da Pasta de Entrada
 C:\Dropbox\Posto1

Caminho completo da Pasta de Saída
 C:\Dropbox\Central


Exames com ou sem Laudo, para serem transmitidos, devem ser copiados antes para a Pasta de Saída, conforme descrito na opção escolhida acima. A transmissão, propriamente, poderá ser feita manualmente, pelo envio dos arquivos por e-mail, ou automaticamente, com software adicional instalado.

☐ Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet
☐ Inclusão em rede (marcar em apenas um dos computadores da rede local)

Ativar alerta sonoro: Não

Cancelar OK

Quando houver muitos postos de captação de ECG, convém configurar o dropbox para os postos sincronizarem somente com as pastas Central e do próprio posto:



Preferências do Dropbox

Geral Conta Importar Largura de banda Proxies Notificações **Sincronização**

Sincronização seletiva


Selecione quais pastas deseja ver neste computador. Qualquer pasta que você desmarcar não será exibida neste computador, mas ainda estará acessível pelo dropbox.com.
 Selecione quais pastas sincronizarão com este computador. Sincronização seletiva...

Localização da pasta do Dropbox

Escolha onde sua pasta Dropbox está localizada em seu computador. Todos os arquivos do seu Dropbox serão salvos nessa pasta.
 C:\Users\leandro\Dropbox Mover...

Ajuda OK Cancelar Aplicar

Diagrama da rede de computadores para Telemedicina com Dropbox

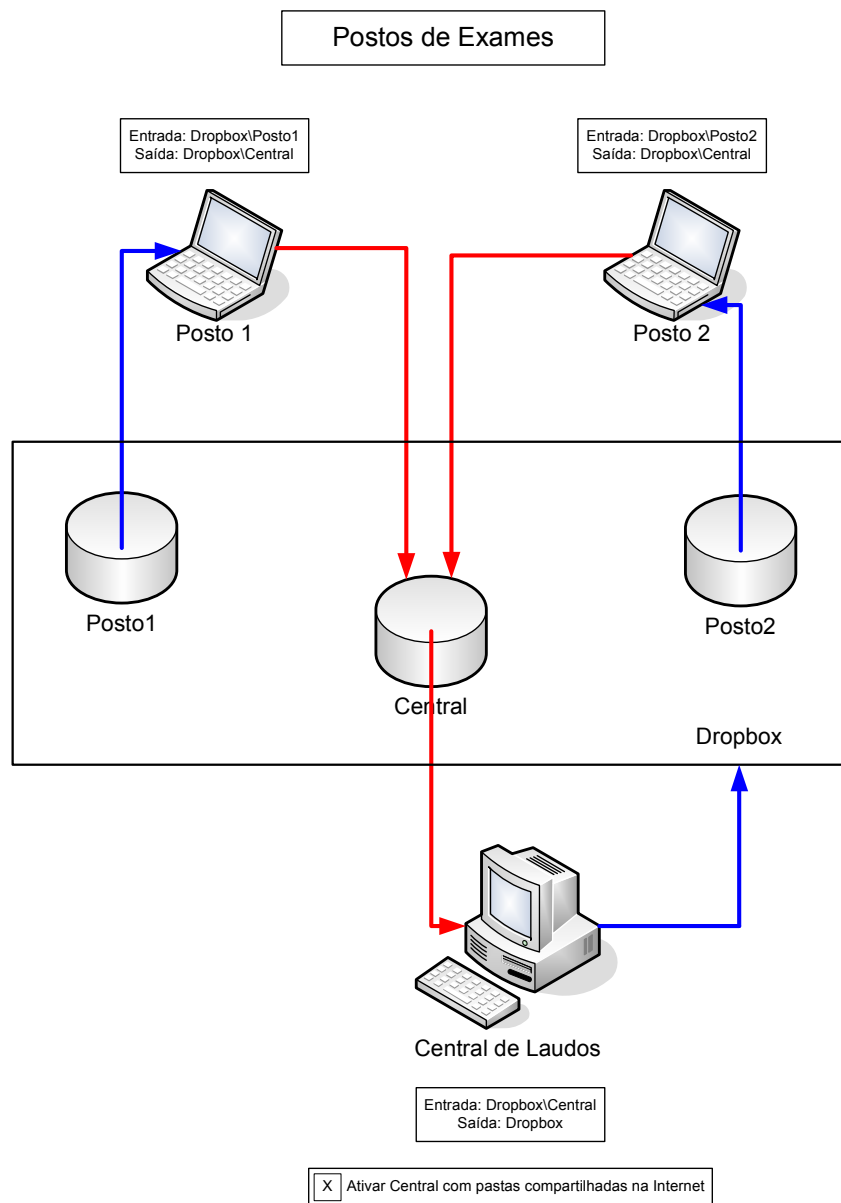

EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB