	<b>ECGPC SQL- Cliente</b>	Número ITM-107	Data 20/07/22 Rev. 01	Página 1 / 5
---	---------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

## 1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para configurar o banco de dados SQL no computador Cliente.

## 2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:

- ECGPC a partir do n/s: 082401108 (gabinete cinza/azul – 1200 amostras/seg)

## 3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que o ECGPC está instalado e funcionando corretamente com a versão mais recente do programa.
- O monitor de vídeo deve ser wide-screen, resolução HD: 1366x768.
- O computador deve ter Windows7-64 bits e 4GB de RAM no mínimo.

## 4. PROCEDIMENTO


### 4.1. INSTALAÇÃO DO ODBC DRIVER

- Execute o arquivo msodbcsql.exe 32 ou 64 bits, conforme o sistema operacional, e siga as instruções de instalação.
- Durante a instalação, ativar o recurso SDK do ODBC Driver for SQL Server




### 4.2. ACRESCENTAR O ODBC NO BDE


- No painel de controle do Windows, abrir o BDE Administrator
- Clique com o botão direito do mouse sobre Databases e selecione ODBC Administrator.

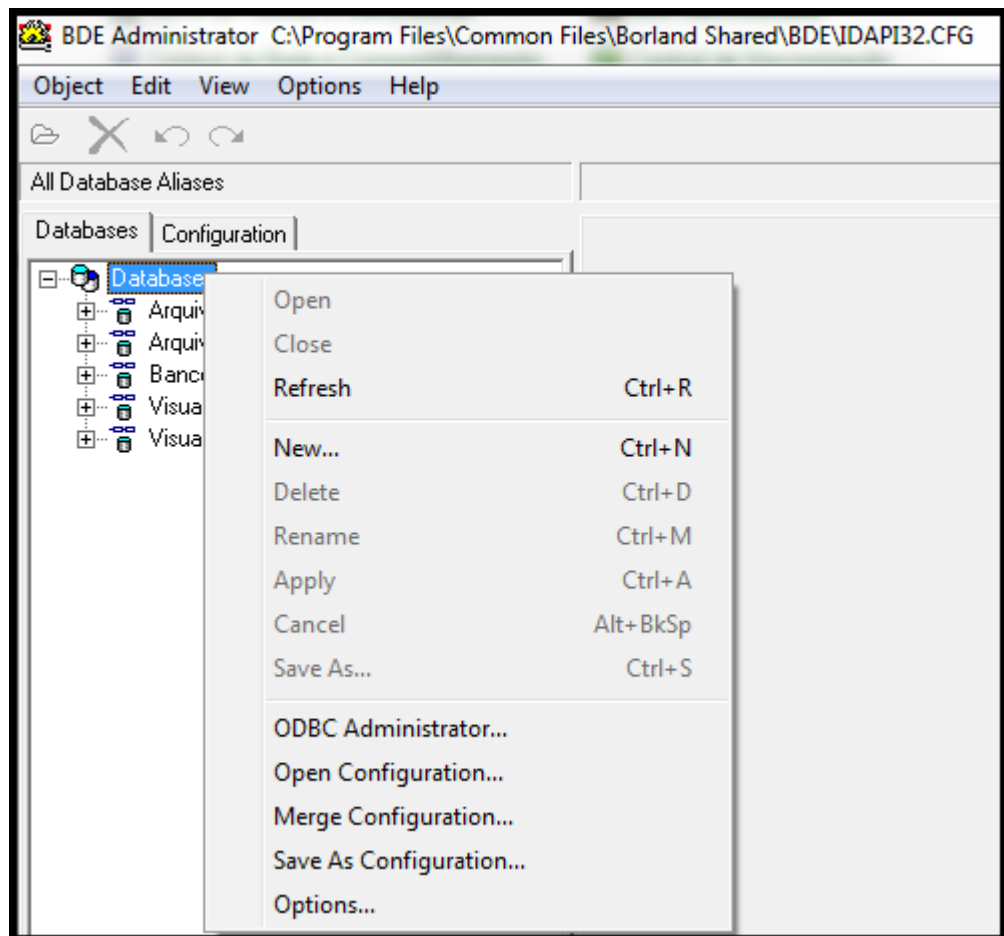


- Clique em Adicionar e depois ODBC Driver 11 for SQL Server e conclua.

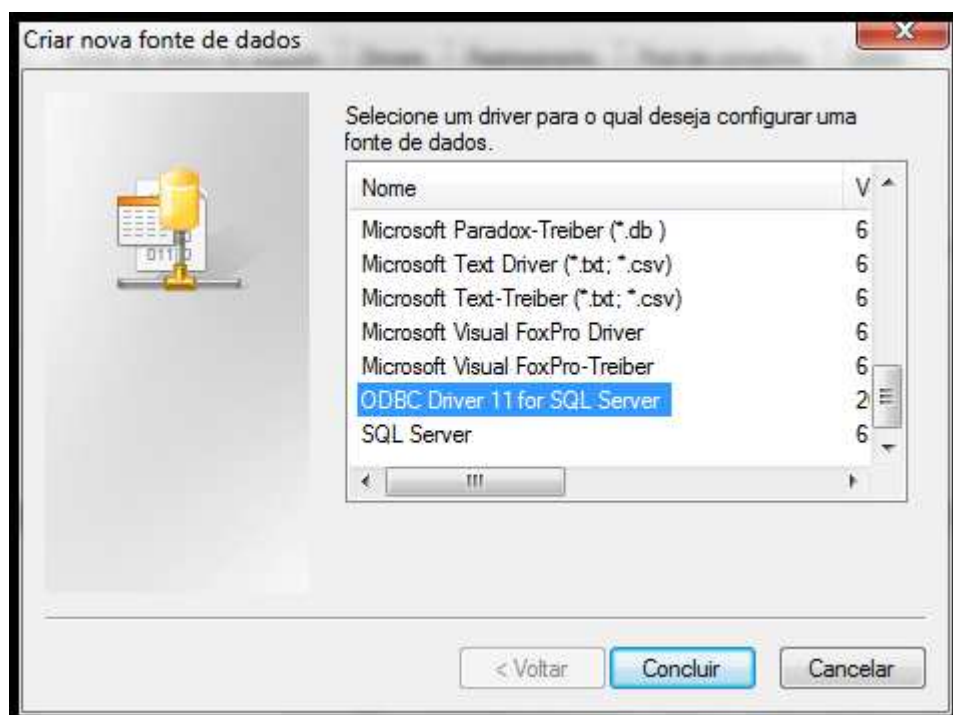

- Preencha os campos. Nome: teb. Descrição: ecgpc. Servidor: Nome do Servidor \ ECGPC

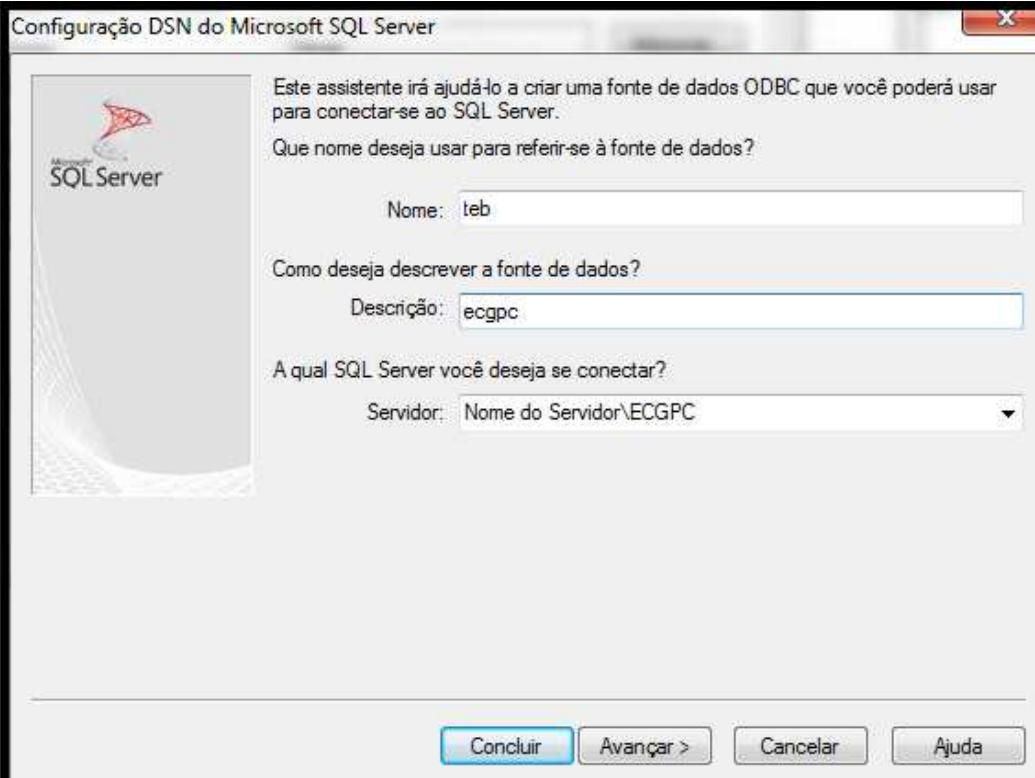


- Selecione Com autenticação do SQL... e preencha a ID de login: ecgpc. Senha: teb.

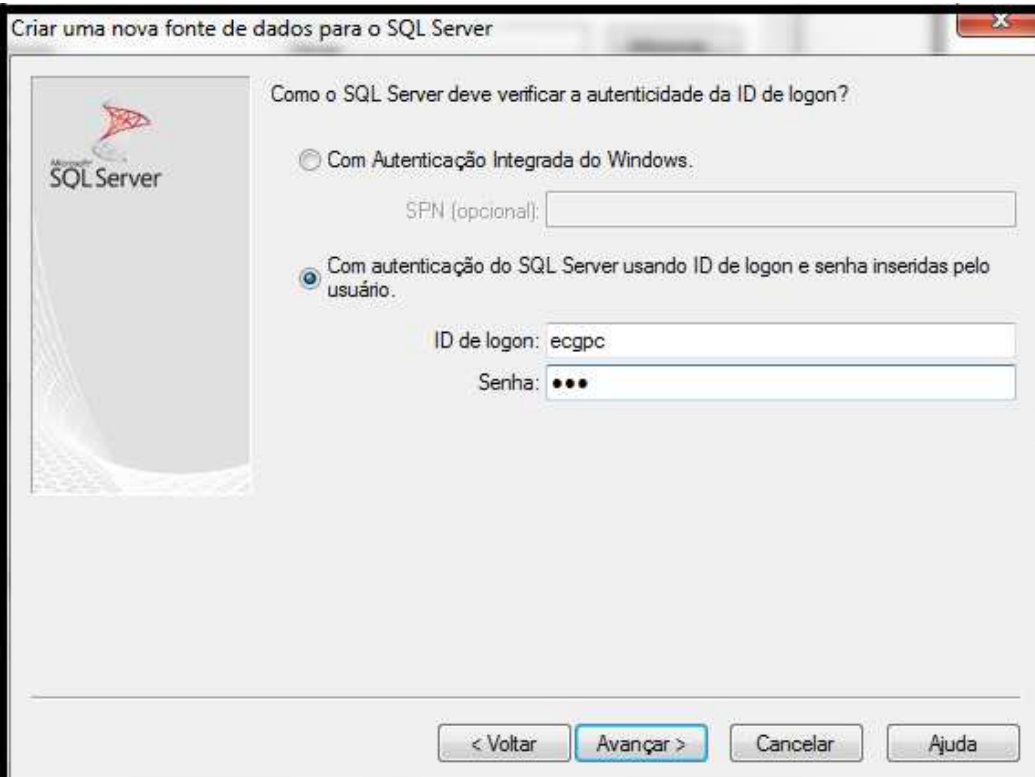


TEB <sup>®</sup>	ECGPC SQL- Cliente	Número ITM-107	Data 20/07/22 Rev. 01	Página 4 / 5
------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

- Avance as telas seguintes e conclua. Na última tela clique em Testar a fonte de dados.
- O resultado esperado do teste é:

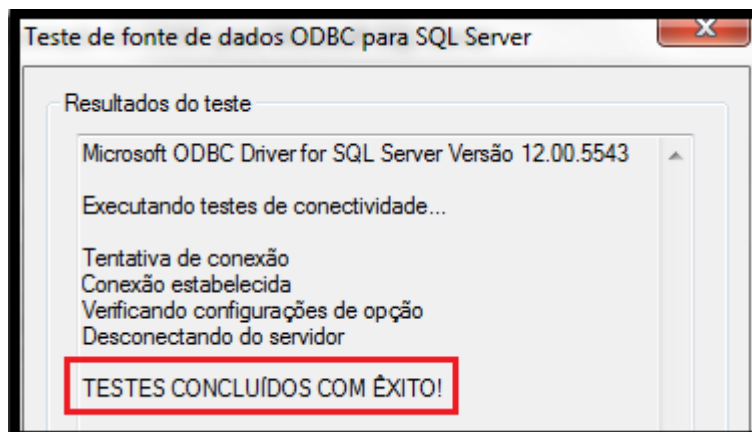


- Confirme todas as telas e feche o BDE Administrator.
- Reinicie o computador.

- Caso o resultado do teste apresente erro, desmarque a opção Protocolo TCP/IP versão 6 da configuração do adaptador de rede:

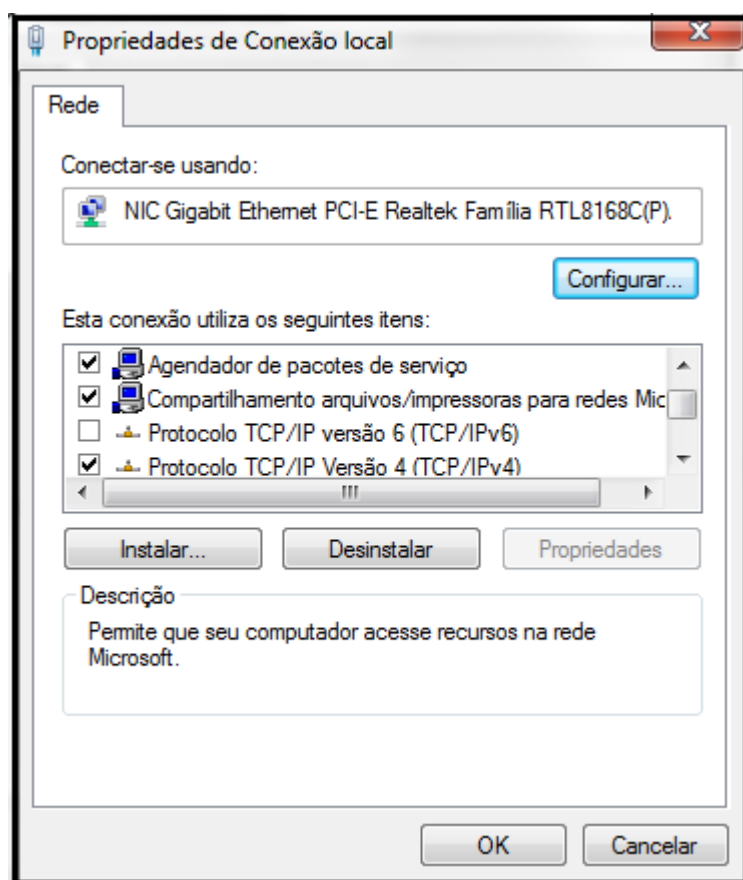

#### 4.3. CONFIGURAÇÃO DO ECGPC

- Execute o ECGPC versão SQL
- Na configuração do Sistema, preencha o campo Local da Pasta de Exames com o nome do servidor \ ECGPC:

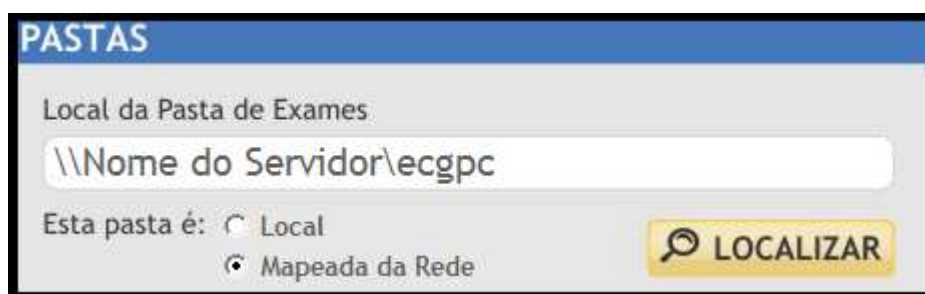

- Selecione a opção: Mapeada na Rede

EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,  
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB