	Telemedicina com One Drive	Número ITM-110	Data 27/03/18 Rev. 00	Página 1 / 4
---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para configurar o ECGPC na Telemedicina em conjunto com o One Drive, quando houver vários Postos de Exames e uma Central da Laudos.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:


- ECGPC de gabinete cinza / azul com a versão 6.5 rev5 em diante.


3. PRECAUÇÕES

- Somente para sistema operacional Windows 10.
- Certifique-se que os ECGPCs estão funcionando corretamente
- A versão do programa do ECGCP deve ser a mesma nos Postos e na Central

4. PROCEDIMENTO

- O One Drive é nativo do Windows 10. Portanto não há necessidade de instalá-lo. Basta criar uma conta com email e senha.
- Criar na pasta One Drive:
 - uma pasta para a **Central**;
 - uma pasta para cada **Posto**, com o mesmo nome usado na Sigla do Local de Instalação definida para o posto na Configuração do Sistema dele.

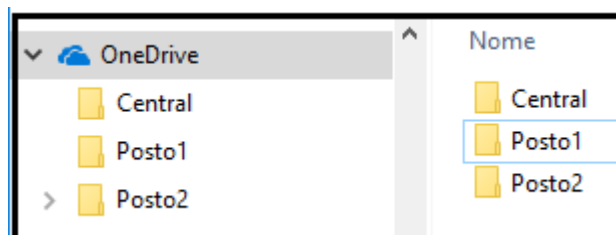


	Telemedicina com One Drive	Número ITM-110	Data 27/03/18 Rev. 00	Página 2 / 4
---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

Na tela de **Configuração de Telemedicina** na **CENTRAL**:

- selecionar a opção “Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta criada para a Central na área compartilhada;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da área compartilhada onde estão as pastas dos postos;
- marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na WEB”.

MODO DE TRABALHO DESTE COMPUTADOR

- ☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
- ☐ Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente
Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída
Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames
- ☒ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente (Central) 
Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames
- ☐ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas recebidos de Central de Distribuição mediante solicitação
- ☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos
Neste caso, desejo que:
- ☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
 - ☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
 - ☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
 - ☐ Apenas eu determine qual exame a incorporar, a partir da Lista de Exames Externos

CONFIGURAÇÕES

Local da Pasta de Entrada

 LOCALIZAR

C:\OneDrive\Central 


Local da Pasta de Saída

 LOCALIZAR

C:\OneDrive\ 

☐ Alerta Sonoro


☐ Inclusão automática via rede (marcar em apenas um dos computadores da rede local)

☒ Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet 

☐ Ativar Central de Distribuição para laudadores remotos

Local da Pasta de Entrada de Solicitações e Laudos:


 LOCALIZAR

	Telemedicina com One Drive	Número ITM-110	Data 27/03/18 Rev. 00	Página 3 / 4
---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

Na configuração dos **POSTOS**:


- selecionar a opção “Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é a sigla do posto;
- configurar como Pasta de Saída a pasta da Central na área compartilhada;
- não marcar a opção “Ativar Central com pastas compartilhadas na WEB”.

MODO DE TRABALHO DESTE COMPUTADOR

- ☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
- ☒ **Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente** 
- Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída. Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames
- ☐ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente (Central)
Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames
- ☐ Efetuará Laudos para eletrocardiogramas recebidos de Central de Distribuição mediante solicitação
- ☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos
- Neste caso, desejo que:
- ☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
 - ☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
 - ☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
 - ☐ Apenas eu determine qual exame a incorporar, a partir da Lista de Exames Externos

CONFIGURAÇÕES

Local da Pasta de Entrada

 LOCALIZAR

C:\OneDrive\Posto1 

Local da Pasta de Saída

 LOCALIZAR

C:\OneDrive\Central 

☐ Alerta Sonoro

☐ Inclusão automática via rede (marcar em apenas um dos computadores da rede local)

☐ Ativar Central com pastas compartilhadas na Internet

☐ Ativar Central de Distribuição para laudadores remotos

Local da Pasta de Entrada de Solicitações e Laudos:


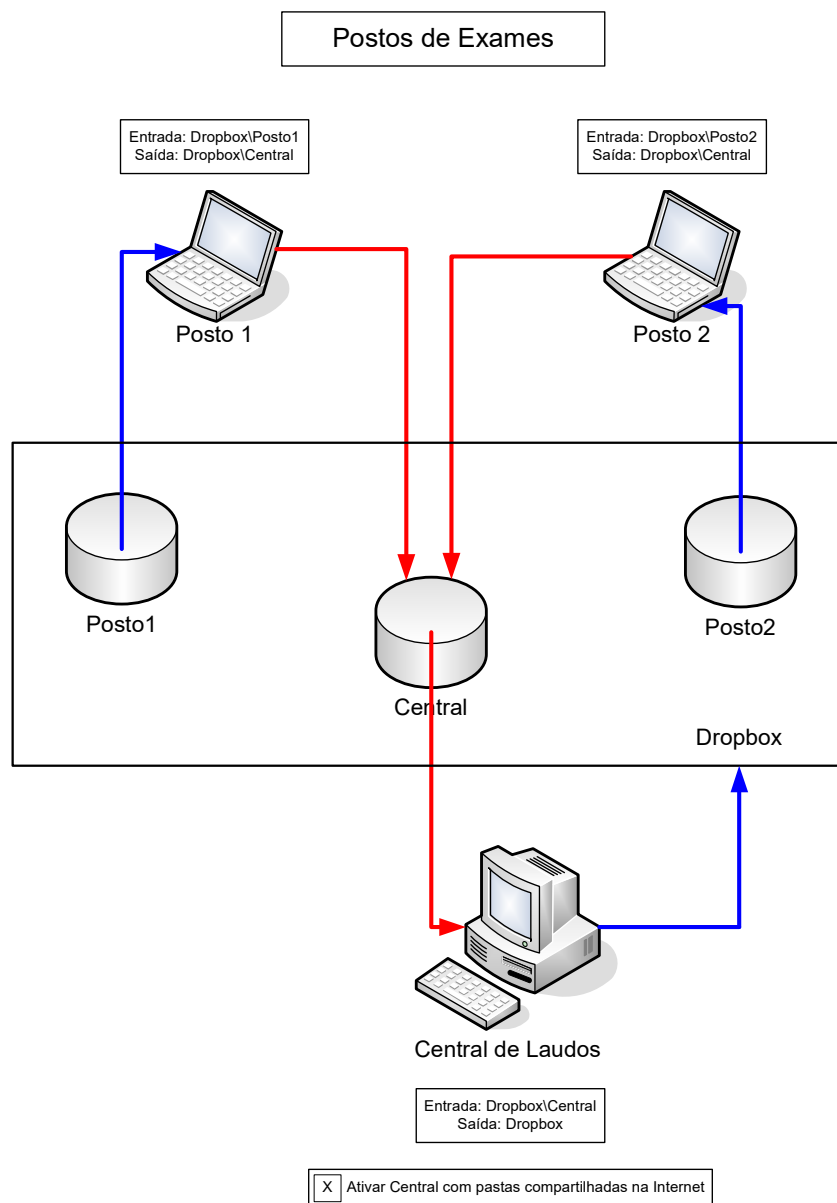
 LOCALIZAR

Diagrama da rede de computadores para Telemedicina com One Drive



EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB