	Telemedicina com ECGPC Um posto de Exames	Número ITM-111	Data 05/11/18 Rev. 01	Página 1 / 3
---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para configurar o ECGPC que fará exames num local e o laudo à distância.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:


- ECGPC de gabinete cinza / azul com a versão 6.5 rev5 ou 6.2 rev3 VET em diante.


3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que o ECGPC está funcionando corretamente.
- A versão do programa do ECGPC deve ser a mesma no computador de Exames e Laudos.

4. PROCEDIMENTO


- Escolha qual programa será utilizado para a transferência dos exames: Dropbox, Google Drive ou One Drive. No caso do One Drive, ele é nativo do Windows 10. Portanto não há necessidade de instalá-lo. Basta criar uma conta com email e senha. Os demais deverão ser instalados e configurados adequadamente.
- No procedimento a seguir foi utilizado o Dropbox. Porém é o mesmo para os outros serviços:
- Criar na pasta Dropbox:
 - uma pasta para os **Exames**;
 - uma pasta para os **Laudos**.

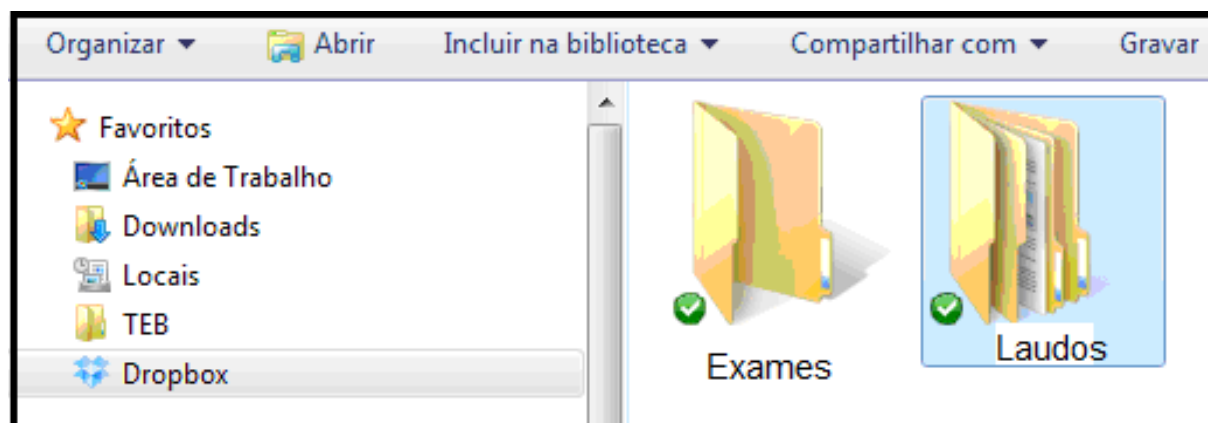

	Telemedicina com ECGPC Um posto de Exames	Número ITM-111	Data 05/11/18 Rev. 01	Página 2 / 3
---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

No computador que fará os exames:

- selecionar a opção “Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é **Laudos**;
- configurar como Pasta de Saída a pasta **Exames** na área compartilhada;

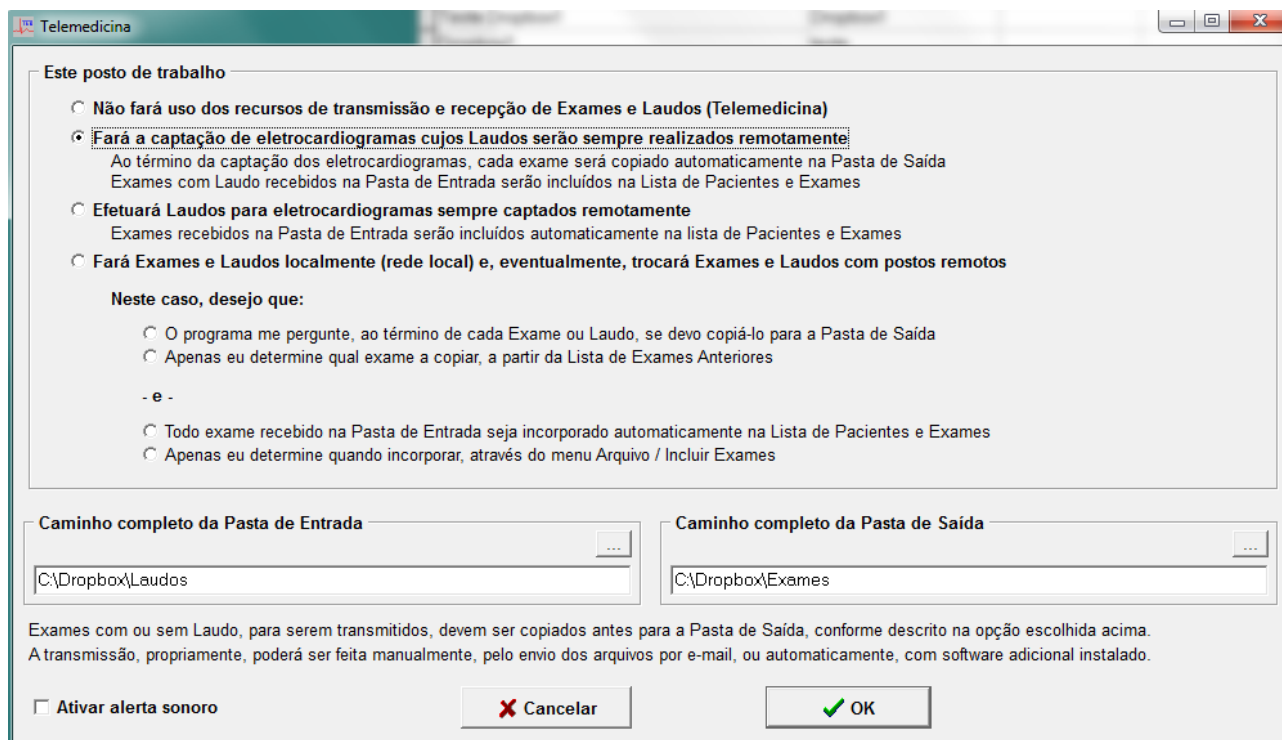

Este posto de trabalho

☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
☒ **Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente**
 Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída
 Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames
☐ **Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente**
 Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames
☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos

Neste caso, desejo que:

☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
☐ Apenas eu determine quando incorporar, através do menu Arquivo / Incluir Exames

Caminho completo da Pasta de Entrada
 C:\Dropbox\Laudos


Caminho completo da Pasta de Saída
 C:\Dropbox\Exames

Exames com ou sem Laudo, para serem transmitidos, devem ser copiados antes para a Pasta de Saída, conforme descrito na opção escolhida acima. A transmissão, propriamente, poderá ser feita manualmente, pelo envio dos arquivos por e-mail, ou automaticamente, com software adicional instalado.

☐ Ativar alerta sonoro
 Cancelar
OK

No computador que fará os Laudos:

- selecionar a opção “Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente”;
- configurar como Pasta de Entrada a pasta da área compartilhada cujo nome é **Exames**;
- configurar como Pasta de Saída a pasta **Laudos** na área compartilhada

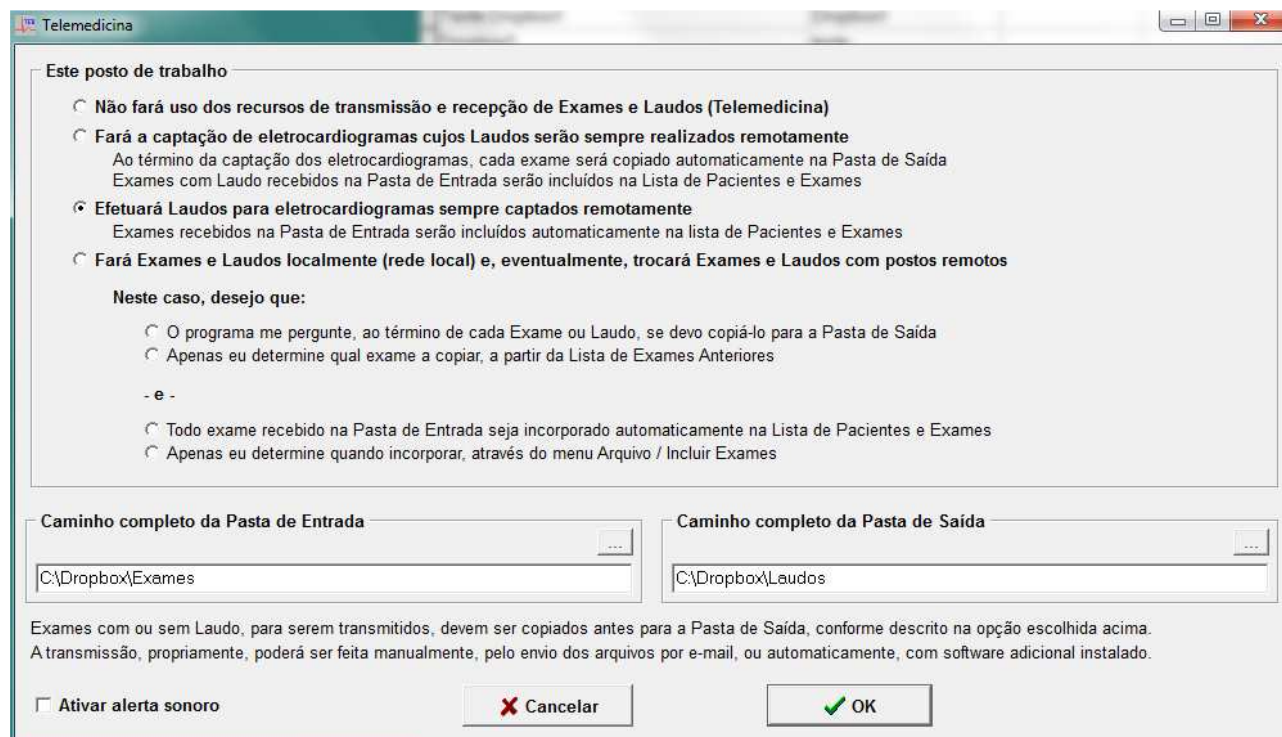

Este posto de trabalho

☐ Não fará uso dos recursos de transmissão e recepção de Exames e Laudos (Telemedicina)
☐ Fará a captação de eletrocardiogramas cujos Laudos serão sempre realizados remotamente
 Ao término da captação dos eletrocardiogramas, cada exame será copiado automaticamente na Pasta de Saída
 Exames com Laudo recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos na Lista de Pacientes e Exames
☒ **Efetuará Laudos para eletrocardiogramas sempre captados remotamente**
 Exames recebidos na Pasta de Entrada serão incluídos automaticamente na lista de Pacientes e Exames
☐ Fará Exames e Laudos localmente (rede local) e, eventualmente, trocará Exames e Laudos com postos remotos

Neste caso, desejo que:

☐ O programa me pergunte, ao término de cada Exame ou Laudo, se devo copiá-lo para a Pasta de Saída
☐ Apenas eu determine qual exame a copiar, a partir da Lista de Exames Anteriores
 - e -
☐ Todo exame recebido na Pasta de Entrada seja incorporado automaticamente na Lista de Pacientes e Exames
☐ Apenas eu determine quando incorporar, através do menu Arquivo / Incluir Exames

Caminho completo da Pasta de Entrada: C:\Dropbox\Exames
 Caminho completo da Pasta de Saída: C:\Dropbox\Laudos

Exames com ou sem Laudo, para serem transmitidos, devem ser copiados antes para a Pasta de Saída, conforme descrito na opção escolhida acima. A transmissão, propriamente, poderá ser feita manualmente, pelo envio dos arquivos por e-mail, ou automaticamente, com software adicional instalado.

☐ Ativar alerta sonoro
 ✗ Cancelar
✓ OK

**EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB**