	Troca da Lona da Esteira Apex200	Número ITM-090	Data 10/04/08 Rev. 00	Página 1 / 3
--	-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento da troca da lona da esteira Apex200

2. APLICAÇÃO

Esteiras TEB Apex200 fabricadas a partir no número 6050101 de mar/96.

3. PRECAUÇÕES:

- Certifique que a esteira esteja funcionando adequadamente, ou seja, ao ser ligada à rede elétrica faz o movimento inicial de busca de inclinação zero.
- **ATENÇÃO:**
Este procedimento envolve risco de choque elétrico. Portanto desligue a esteira da rede elétrica antes de executá-lo.


4. MATERIAL NECESSÁRIO

- Chave philips e fenda média e grande
- Chave Allen 1/4"
- Chave de boca 7/16"
- Lona da esteira PM422
- Óleo de silicone
- Pincel largo


5. PROCEDIMENTO

5.1 RETIRADA DA LONA


- Solte os parafusos que fixam a carenagem superior, levantando-a.
- Retire a carenagem traseira para ter acesso ao rolete.

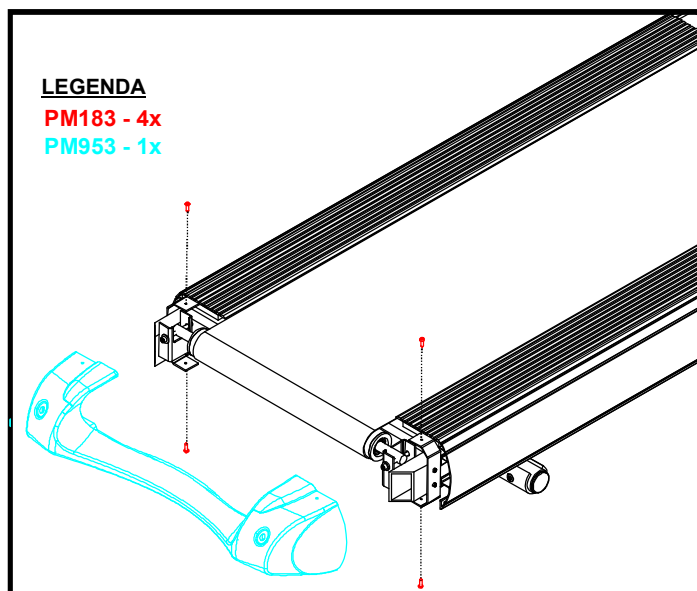

- Solte os dois parafusos Allen para retirar o rolete traseiro.
Atenção: marque a posição do parafuso de ajuste do rolete traseiro

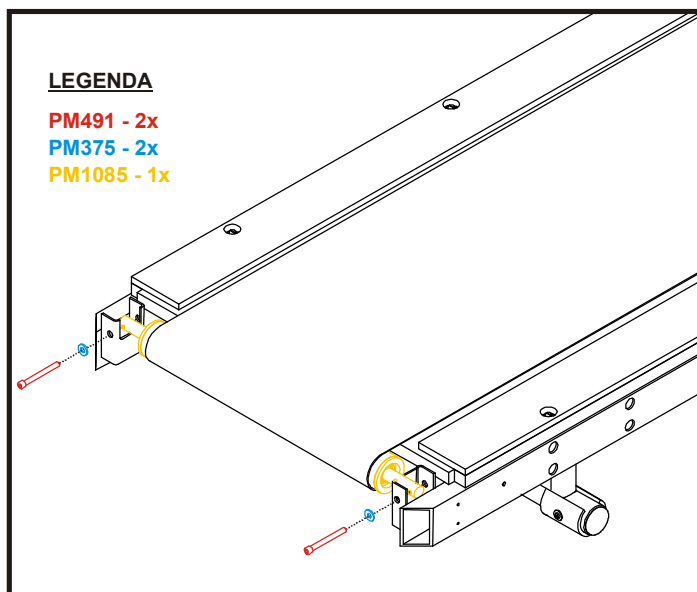


- Atenção:** marque a posição do parafuso de ajuste do rolete dianteiro. Solte o parafuso, a correia e retire o rolete.

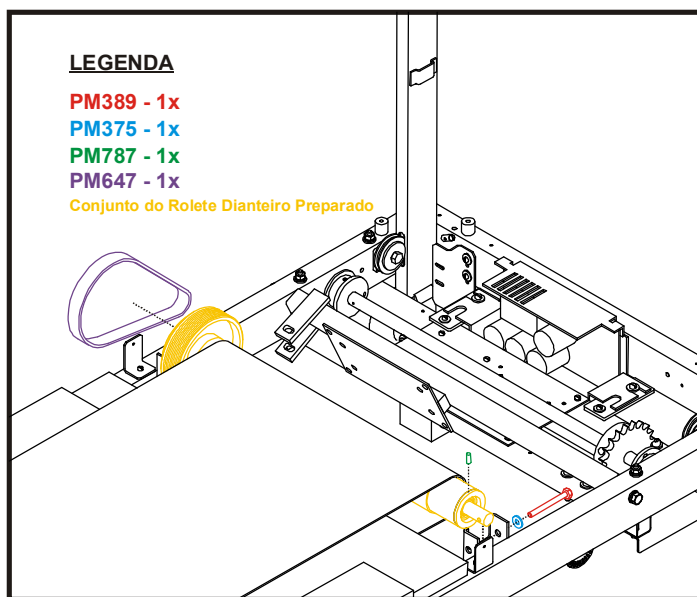

- Retire as tampinhas dos acabamentos da plataforma para ter acesso aos parafusos de fixação.

- Retire os parafusos do lado direito da plataforma e afrouxe os do lado esquerdo.

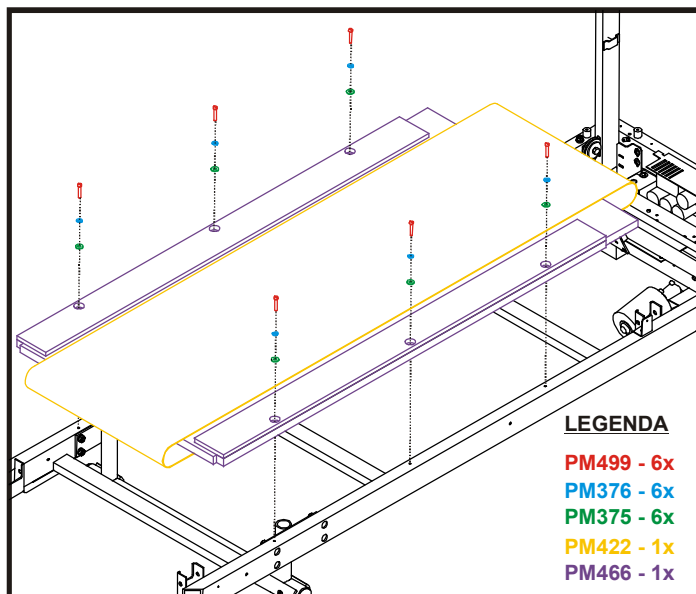

- Levante a plataforma do lado direito e retire a lona, puxando-a para direita.

5.2 MONTAGEM DA LONA NOVA

- Coloque a lona nova.
- Instale o rolete dianteiro, prendendo a correia e fixando-o através do parafuso de ajuste. Ajuste da posição do rolete: deve ser a mesma da anterior.
- Lubrifique toda a superfície da plataforma, aplicando o óleo de silicone com um pincel largo.
- Passe o cilindro traseiro por dentro da lona e fixe-o pelos parafusos Allen conforme marcação feita antes da retirada.
- Coloque os parafusos da plataforma e aperte-os firmemente.
- Tampe os furos de acesso à plataforma com as tampinhas e monte as carenagens traseiras.
- Fixe a carenagem superior.

5.3 AJUSTES

- Ligue a esteira e verifique o funcionamento no segundo estágio de BRUCE.
- Ajuste a posição da lona, atuando nos parafusos Allen do rolete traseiro, para que esta fique no centro da plataforma.
- Caminhe sobre a lona no 2º estágio de Bruce e force a parada da lona. Caso patine, ajuste a pressão da lona e/ou da mola da correia.

EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA, CONSULTE A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB