

TEB [®]	MTT com Alfamed	Número ITM-112	Data 09/04/19 Rev. 01	Página 1 / 4
-------------------------	------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para instalar e configurar o Monitor Multiparamétrico Alfamed Vita200e como monitor de PA do MTT (módulo Tilt-test)

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos seguintes equipamentos:

- Módulo de Tilt-test para ECGPC (Branco) ou C10+C30+.

3. PRECAUÇÕES

- Certifique-se que o ECGPC ou C10+C30+ está funcionando corretamente.
- A conexão entre o monitor Alfamed e o computador é feita através de um cabo de rede RJ45. Caso for utilizar a rede de computadores do cliente, é obrigatório o acompanhamento do administrador da rede para executar a instalação.

4. PROCEDIMENTO

4.1. INSTALAÇÃO SEM REDE


Quando o computador não está conectado à uma rede de computadores.

a. Configuração do Alfamed

- Pressione o botão System Menu do painel:



- Escolha a opção MAINTAIN

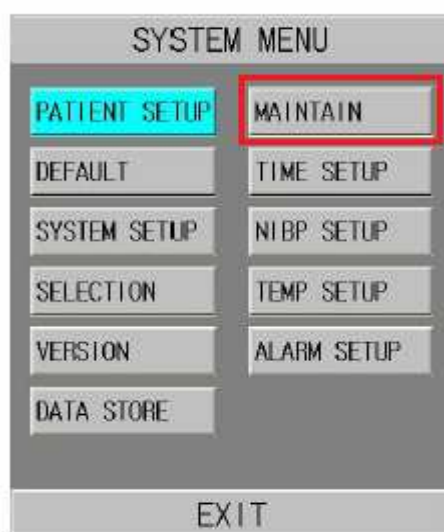

TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA.

Av. Diederichsen 1057 - São Paulo – Fone/Fax: (11) 5017-8555 – e-mail: tebserv@teb.com.br

- Na linha USER KEY digite: 9981 e CONFIRM



- Na linha BED No. digite: 7
Na linha SERVER IP digite: 192.168.0.244




Assim o IP do monitor Alfamed fica: 192.168.0.7

- Clique em EXIT

b. Configuração do computador


- Configure o IP do computador para 192.168.0.5

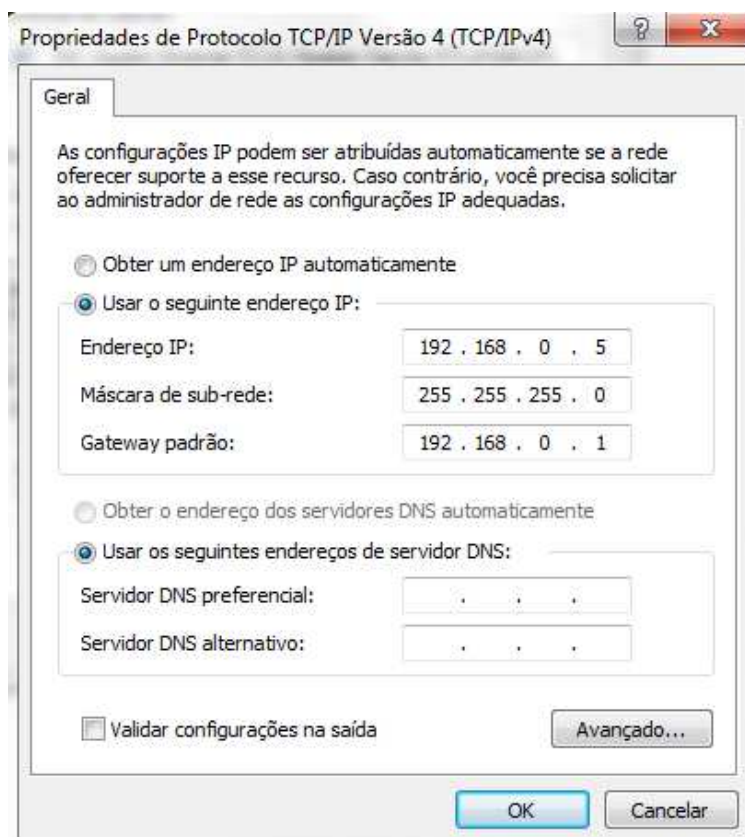

- **Atenção:** Reinicie o computador e o monitor Alfamed.


c. Configuração do Tilt-test

- Selecione o monitor Alfamed na lista de medidores de PA e digite o IP do medidor:

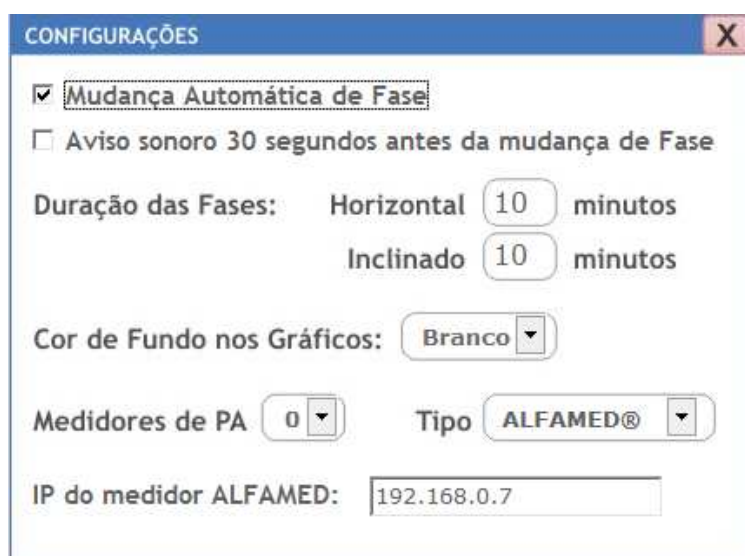

d. Verificação do funcionamento

- Ligue o monitor Alfamed ao computador através do cabo de rede. Alguns computadores não aceitam a ligação diretamente com outro dispositivo. Neste caso será necessário utilizar um cabo de rede do tipo Cross-Over ou através de um HUB ou Switch.
- Execute o programa do tilt-test e inicie um exame
- Faça uma medida de pressão no monitor Alfamed
- Verifique se os valores da PA do Alfamed foram transferidos para os campos PS/PD do programa do tilt-test:

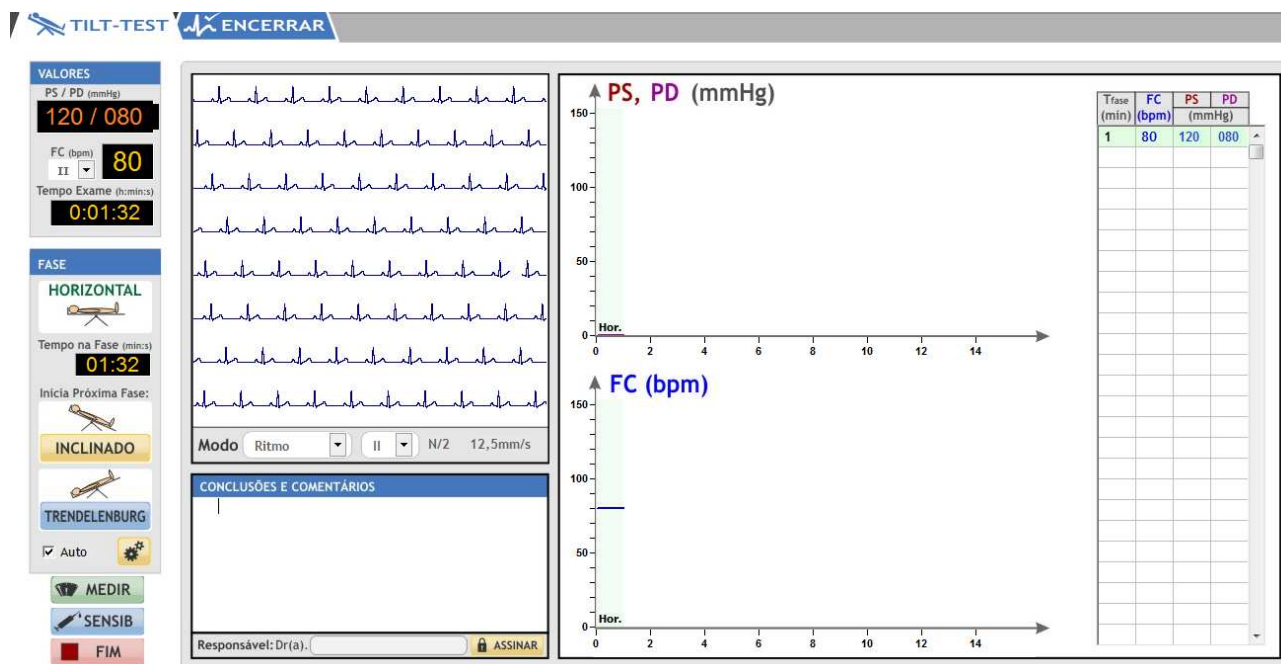

4.2. INSTALAÇÃO COM REDE

Quando o computador está conectado à uma rede de computadores (com ou sem fio). Neste caso deve-se verificar com o administrador da rede qual endereço IP está disponível pois o monitor Alfamed requer um IP fixo. Já o computador não é necessário configurar pois assumirá o IP distribuído pela rede automaticamente.

Exemplo: Os endereços da rede são 192.168.0.X, onde X é o número atribuído aos dispositivos conectados à rede (Computadores, Impressoras, Roteadores, etc.). Neste caso o Alfamed deve ser configurado conforme a instrução de instalação sem rede. Caso o endereço 192.168.0.7 já esteja ocupado, deve-se alterar o item BED No. para outro disponível.

O IP do monitor Alfamed deve ser configurado no programa do Tilt-test.

EM CASO DE ALGUMA DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB