

	Correção do Erro de Gravação no ECGPC-VET	Número ITM-117	Data 24/09/21 Rev. 00	Página 1 / 3
---	--	-------------------	-----------------------------	-----------------

1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para corrigir o erro de gravação do ECGPC VET

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se ao seguinte equipamento:


- ECGPC VET com banco de dados de pacientes, V6.2.
- Computadores que receberam uma atualização automática do Windows 10 e causou a mensagem de erro da Gravação.

3. PRECAUÇÕES


- Certifique-se que o ECGPC está funcionando corretamente.
- Verifique se a telemedicina está habilitada. Nesse caso, anote as configurações e a sigla do local de instalação do ECGPC (Configurar Sistema).
- Anote também os dados institucionais da clínica, pois será necessário preencher novamente após a reinstalação do programa.

4. PROCEDIMENTO


- Desinstale o programa do ECGPC VET através do “Aplicativos e Recursos” do Windows.
- Instale o programa do ECGPC VET, executando o arquivo setup do Disco de Instalação.
- Durante a instalação, na tela “Destination Folder” clique em Change.

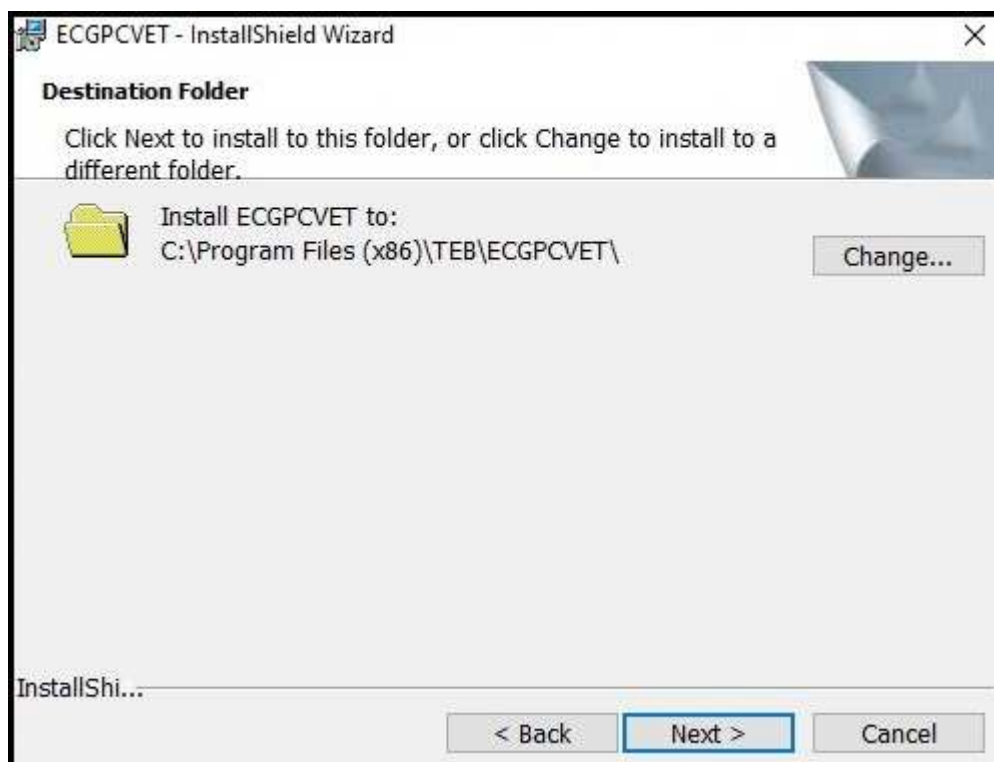

- Na tela “Change Current Destination Folder” localize o campo “Folder Name”.
Altere o caminho para C:\ECGPCVET\

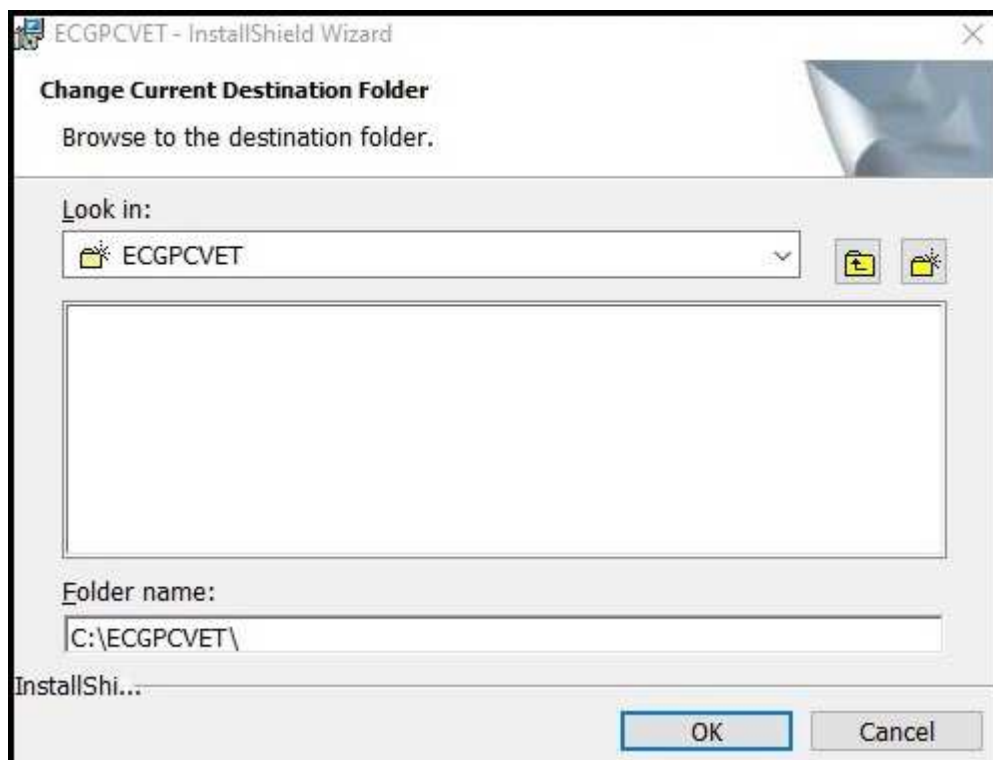

- Conclua a instalação e execute o programa do ECGPC VET.
- Confirme a mensagem de criar o Banco de Dados e aguarde a conclusão.

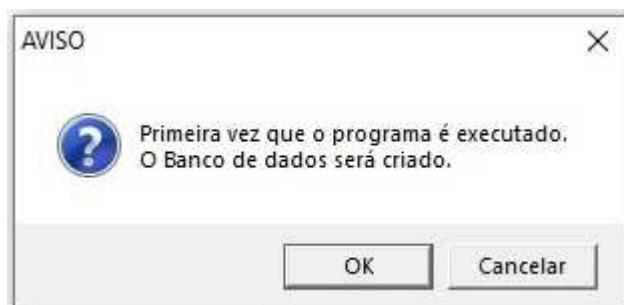

- Caso utilize os recursos de telemedicina, configure os campos correspondentes.

**EM CASO DE DÚVIDA SOBRE O PROCEDIMENTO ACIMA,
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA TEB**